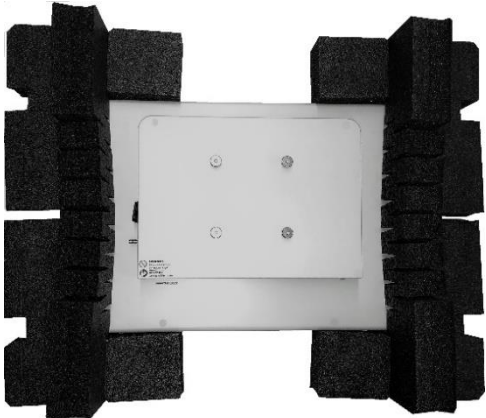



TRANSPORTHINWEISE für ACL-Geräte

Um Transportschäden zu vermeiden, empfehlen wir dringend die Verwendung von ACL-Originalverpackungen. Sollten Sie keine geeignete Transportverpackung haben, senden wir Ihnen gern geeignete Materialien für Ihr Gerät zu - im Garantiefall kostenlos, außerhalb der Garantie gegen Berechnung. Unsachgemäße Verpackungen können zur Beschädigung einzelner Komponenten führen. Sorgen Sie deshalb bei Transporten und Verladevorgängen für eine schonende Behandlung. Achten Sie bei Ladevorgängen und innerbetrieblichen Transporten stets auf eine schonende Behandlung und vermeiden Sie hartes Aufsetzen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Service unter: +49 341 23078-60 oder service@acl.de.

OR-PC®/ OR-MD® 21	OR-PC®/ OR-MD® 24
<ol style="list-style-type: none"> Entfernen Sie sämtliche Kabel, Halterungsteile und sonstiges Zubehör. Stecken Sie je ein Polster seitlich auf das Gerät. 	<ol style="list-style-type: none"> Entfernen Sie sämtliche Kabel, Halterungsteile und sonstiges Zubehör. Stecken Sie je ein Polster seitlich auf das Gerät. Brechen Sie die umliegenden Ränder der Polster händisch ab und entsorgen Sie die abgebrochenen Teile. 

- Stellen Sie den Karton aufrecht auf und schieben Sie das Gerät inkl. Seitenhalterungen in den vorgesehenen Transportkarton.



- Verstauen Sie die Zubehörteile (Netzteil etc.) im Zubehörkarton. Legen Sie den Zubehörkarton oben auf.





Verschließen Sie den Karton mit ausreichend Klebeband.

TRANSPORTHINWEISE für ACL-Geräte

Um Transportschäden zu vermeiden, empfehlen wir dringend die Verwendung von ACL-Originalverpackungen. Sollten Sie keine geeignete Transportverpackung haben, senden wir Ihnen gern geeignete Materialien für Ihr Gerät zu - im Garantiefall kostenlos, außerhalb der Garantie gegen Berechnung. Unsachgemäße Verpackungen können zur Beschädigung einzelner Komponenten führen. Sorgen Sie deshalb bei Transporten und Verladevorgängen für eine schonende Behandlung. Achten Sie bei Ladevorgängen und innerbetrieblichen Transporten stets auf eine schonende Behandlung und vermeiden Sie hartes Aufsetzen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Service unter: +49 341 23078-60 oder service@acl.de.

OR-PC®/ OR-MD® 19	OR-PC®/ OR-MD® 27, 32, 42, 43, 55
<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="113 622 794 694">Entfernen Sie sämtliche Kabel, Halterungsteile und sonstiges Zubehör. <li data-bbox="113 716 794 846">Platzieren Sie das Gerät zwischen den Spaltfolien. Pressen Sie beide Folien aufeinander. Das Gerät darf zwischen den Folien keinerlei Bewegungsfreiheit haben.  <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="113 1182 794 1366">Legen Sie den Zubehörkarton über die obere Spannfolie. Nutzen Sie ein Messer um den Karton an allen vier Ecken soweit herunterzuschneiden, dass die Spannfolien im Karton keinerlei Bewegungsspielraum mehr haben.  <p data-bbox="177 1888 719 1948">Verschließen Sie den Karton mit ausreichend Klebeband.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="801 622 1460 694">Entfernen Sie sämtliche Kabel, Halterungsteile und sonstiges Zubehör. <li data-bbox="801 716 1460 817">Stecken Sie zwei Airbags seitlich auf das Gerät und platzieren Sie es im Versandkarton. Verschließen Sie den Karton. <p data-bbox="863 846 1342 936">Stellen Sie den Karton aufrecht auf eine Versandpalette und fixieren Sie ihn mit Spanngurten/ Umreifungsband.</p> <p data-bbox="863 965 1449 1055">Der Transport des Kartons im liegenden Zustand kann das Gerät beschädigen! Der Karton darf nicht größer sein als die Palette.</p> 