

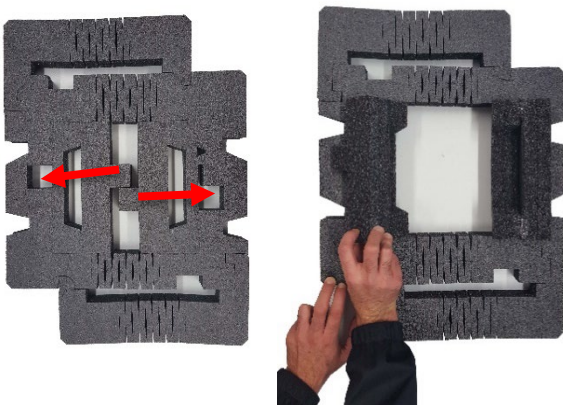
## TRANSPORTHINWEISE für ACL-Geräte

Um Transportschäden zu vermeiden, empfehlen wir dringend die Verwendung von ACL-Originalverpackungen. Sollten Sie keine geeignete Transportverpackung haben, senden wir Ihnen gern geeignete Materialien für Ihr Gerät zu - im Garantiefall kostenlos, außerhalb der Garantie gegen Berechnung. Unsachgemäße Verpackungen können zur Beschädigung einzelner Komponenten führen. Sorgen Sie deshalb bei Transporten und Verladevorgängen für eine schonende Behandlung. Achten Sie bei Ladevorgängen und innerbetrieblichen Transporten stets auf eine schonende Behandlung und vermeiden Sie hartes Aufsetzen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Service unter: +49 341 23078-60 oder [service@acl.de](mailto:service@acl.de).

### OR-PC®/ OR-MD® 15

1. Entfernen Sie sämtliche Kabel, Halterungsteile und sonstiges Zubehör.
2. Legen Sie den Schaumstoff vor sich hin und biegen Sie die folgenden Schaumstoffteile in die jeweilige Öffnung.



3. Drehen Sie den Schaumstoff um, ziehen ihn leicht auseinander und legen das Gerät mit der Rückseite in den Schaumstoff.
4. Nehmen Sie die Ecken der beiden Schaumstoffteile, spannen es über den Display und klemmen es auf der gegenüberliegenden Seite ein.



5. Stellen Sie den Karton aufrecht auf und schieben Sie das Gerät inkl. Seitenhalterungen in den vorgesehenen Transportkarton.
6. Verstauen Sie die Zubehörteile (Netzteil etc.) im Zubehörkarton. Legen Sie den Zubehörkarton oben auf.

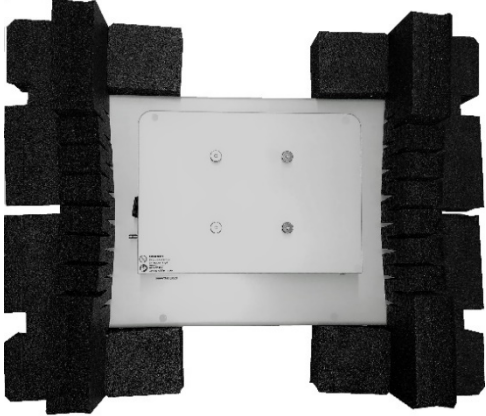
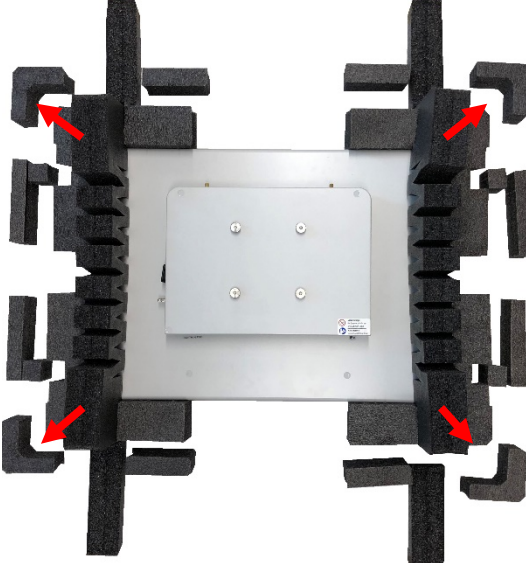


Verschließen Sie den Karton mit ausreichend Klebeband.

## TRANSPORTHINWEISE für ACL-Geräte

Um Transportschäden zu vermeiden, empfehlen wir dringend die Verwendung von ACL-Originalverpackungen. Sollten Sie keine geeignete Transportverpackung haben, senden wir Ihnen gern geeignete Materialien für Ihr Gerät zu - im Garantiefall kostenlos, außerhalb der Garantie gegen Berechnung. Unsachgemäße Verpackungen können zur Beschädigung einzelner Komponenten führen. Sorgen Sie deshalb bei Transporten und Verladevorgängen für eine schonende Behandlung. Achten Sie bei Ladevorgängen und innerbetrieblichen Transporten stets auf eine schonende Behandlung und vermeiden Sie hartes Aufsetzen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Service unter: +49 341 23078-60 oder [service@acl.de](mailto:service@acl.de).

OR-PC®/ OR-MD® 21	OR-PC®/ OR-MD® 24
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie sämtliche Kabel, Halterungsteile und sonstiges Zubehör.</li> <li>2. Stecken Sie je ein Polster seitlich auf das Gerät.</li> </ol> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie sämtliche Kabel, Halterungsteile und sonstiges Zubehör.</li> <li>2. Stecken Sie je ein Polster seitlich auf das Gerät. Brechen Sie die umliegenden Ränder der Polster händisch ab und entsorgen Sie die abgebrochenen Teile.</li> </ol> 

3. Stellen Sie den Karton aufrecht auf und schieben Sie das Gerät inkl. Seitenhalterungen in den vorgesehenen Transportkarton.



4. Verstauen Sie die Zubehörteile (Netzteil etc.) im Zubehörkarton. Legen Sie den Zubehörkarton oben auf.





Verschließen Sie den Karton mit ausreichend Klebeband.

## TRANSPORTHINWEISE für ACL-Geräte

Um Transportschäden zu vermeiden, empfehlen wir dringend die Verwendung von ACL-Originalverpackungen. Sollten Sie keine geeignete Transportverpackung haben, senden wir Ihnen gern geeignete Materialien für Ihr Gerät zu - im Garantiefall kostenlos, außerhalb der Garantie gegen Berechnung. Unsachgemäße Verpackungen können zur Beschädigung einzelner Komponenten führen. Sorgen Sie deshalb bei Transporten und Verladevorgängen für eine schonende Behandlung. Achten Sie bei Ladevorgängen und innerbetrieblichen Transporten stets auf eine schonende Behandlung und vermeiden Sie hartes Aufsetzen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Service unter: +49 341 23078-60 oder [service@acl.de](mailto:service@acl.de).

OR-PC®/ OR-MD® 19	OR-PC®/ OR-MD® 27, 32, 42, 43, 55
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie sämtliche Kabel, Halterungsteile und sonstiges Zubehör.</li> <li>2. Platzieren Sie das Gerät zwischen den Spaltfolien. Pressen Sie beide Folien aufeinander. Das Gerät darf zwischen den Folien keinerlei Bewegungsfreiheit haben.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Legen Sie den Zubehörkarton über die obere Spannfolie. Nutzen Sie ein Messer um den Karton an allen vier Ecken soweit herunterzuschneiden, dass die Spannfolien im Karton keinerlei Bewegungsspielraum mehr haben.</li> </ol>  <p>Verschließen Sie den Karton mit ausreichend Klebeband.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie sämtliche Kabel, Halterungsteile und sonstiges Zubehör.</li> <li>2. Stecken Sie zwei Airbags seitlich auf das Gerät und platzieren Sie es im Versandkarton. Verschließen Sie den Karton.</li> </ol> <p>Stellen Sie den Karton aufrecht auf eine Versandpalette und fixieren Sie ihn mit Spanngurten/ Umreifungsband.</p> <p>Der Transport des Kartons im liegenden Zustand kann das Gerät beschädigen! Der Karton darf nicht größer sein als die Palette.</p> 